

Shrnutí a vysvětlení k sadě:

OMNImet™-GUT obsahuje materiály a pokyny k odběru a stabilizaci metabolitů z lidských vzorků stolice.






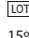

Upozornění a opatření:

- Zacházejte se sadou opatrně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před tepelnými zdroji, jiskrami a otevřeným plamenem.
- Když zkumavku se stabilizační tekutinou nepoužíváte, dbejte, aby byla pevně uzavřena.
- POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.
- NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek.
- Dbejte, aby se stabilizační tekutina NEVYLILA ze zkumavky.
- Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. Může dojít k závažnému podráždění očí. NEPOŽÍVEJTE.
- Podívejte se na bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenotek.com.
- Jestliže odebíráte vzorek tekuté stolice, podívejte se na pokyny pro uživatele dodané samostatně.
- Drobné předměty mohou představovat nebezpečí udušení.

Uchování: Před odběrem i po odběru vzorků uchovávejte při pokojové teplotě 15 °C až 25 °C.

Posílejte v souladu s platnými předpisy pro přepravu biologických vzorků.

Legenda ke štítku:

-  Hořlavá látka
-  Upozornění
-  Odeberte vzorek do (použijte do)
-  Katalogové číslo
-  Výrobce
-  Pozor, přečtěte si pokyny k použití
-  Číslo šarže
- 15°C / 25°C Skladovací pokyny
- 60°F / 78°F

Pouze pro účely výzkumu

Nepoužívejte při diagnostických postupech

Vynikající vzorky
Osvědčené provedení

DNAGENOTEK™

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2
Dceřiná společnost OraSure Technologies, Inc.

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

POKYNY PRO UŽIVATELE

Před odběrem vzorků si přečtěte všechny pokyny.

Postup:



1 DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVA:

- Před zahájením odběru se vymočte.
- Odeberte vzorek stolice bez moči nebo vody z toalety.
- Použijte doplňěk pro odběr na toaletě, který může být dodán s odběrovou sadou.
- Budete možná potřebovat toaletní papír nebo ubrousky.



2 Přidrte žlutý vršek zkumavky a odšroubujte POUZE fialové víčko. To odložte stranou pro pozdější použití.

Se stabilizační tekutinou zacházejte velmi opatrně.

DŮLEŽITÉ:

NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek. Dbejte, aby se stabilizační tekutina NEVYLILA ze zkumavky. Zkumavka není zkonstruována tak, aby stála vzpřímeně, proto dávejte pozor, aby se stabilizační tekutina NEVYLILA ze zkumavky.



3 Pomocí špachtle odeberte malé množství vzorku stolice.


Skutečná velikost vzorku stolice.



4 Přeneste vzorek stolice do horní části žlutého vršku zkumavky.


Opakujte, dokud vzorek nezaplní žlutý vršek zkumavky.

DŮLEŽITÉ: NEVTLAČUJTE vzorek do zkumavky.

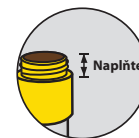

5 Vodorovným seškrábnutím přes vršek zkumavky vzorek zarovnejte a odstraňte přebytečné množství.

Je-li zapotřebí, otřete zkumavku zvenčí toaletním papírem nebo ubrouskem.

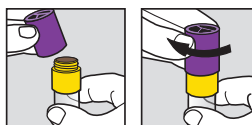


6 Vezměte fialové víčko a pevně je našroubujte na žlutý vršek zkumavky.



7 Zavřenou zkumavku co nejsilněji a nejrychleji protřepávejte pohybem sem a tam po nejméně 30 sekund.

Vzorek stolice se tak promíchá se stabilizační tekutinou ve zkumavce. Ne všechny částice se rozpustí.

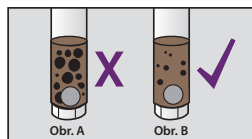

8 DŮLEŽITÉ: Pokud ve zkumavce zůstávají velké částice jako na obrázku A, pokračujte v protřepávání.



9 Špachtli vložte do původního obalu nebo ji zabalte do toaletního papíru a odhodte do odpadu.

DŮLEŽITÉ: Vzorek odešlete ke zpracování podle pokynů k odesílání, samostatně dodaných poskytovatelem sady.

OMNImet™-GUT slouží pouze k použití ve výzkumu, nikoli k diagnostickým postupům. Některé produkty společnosti DNA Genotek™ nemusí být dostupné ve všech geografických oblastech. Bližší údaje vám sdělí prodejní zástupce. Veškeré protokoly společnosti DNA Genotek, její bílé knihy a poznámky k aplikaci jsou k dispozici v sekci podpory na našich webových stránkách www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2020 DNA Genotek Inc., všechna práva vyhrazena. PD-PR-00980 (CZ - Czech) Issue 1/2020-05