

За употреба при инвитро диагностика



Предпазни мерки при вземане на проба:

Уверете се, че върхът на тампона **НЕ** влиза в контакт с каквато и да е повърхност преди вземането на проба.

Донорът **НЕ** трябва да яде, пие, пуши или дъвче дъвка в продължение на 30 минути преди вземането на устната проба.

Предназначение: Този продукт е разработен за вземане и стабилизиране на ДНК от човешки устни проби.

Съдържание: Съдържа 1 комплект за вземане на проба






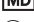



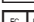

Предупреждения и предпазни мерки: Риск от задушаване. Трябва да се внимава при вкарване на тампона в устата.

Измийте с вода, ако стабилизиращата течност влезе в контакт с очите или кожата. **НЕ** поглъщайте. Вж. Информационния лист за безопасност на материала на адрес www.dnagenotek.com

Съхранение: 15°C-25°C

Обобщение и обяснение на комплекта: ORACollect-DNA е комплект за самостоятелно вземане на проба, който предоставя материалите и инструкциите за вземане на човешки устни проби.

Легенда на етикета:

	Каталожен номер
	Медицинско изделие за инвитро диагностика
	СЕ маркировка
	UKCA маркировка
	Производител
	Медицинско изделие
	Не използвайте повторно
	Консултирайте се с инструкциите за употреба
	Срок на годност
	Номер на партида
	Упълномощен представител

БЪЛГАРСКИ

Инструкции за вземане на проба:

	<p>Отворете опаковката и извадете колектора, без да докосвате върха на тампона. Поставете тампона колкото може по-навътре в устата, без пациентът да изпитва дискомфорт, и потъркайте в долните венци (вижте изображението отблизо) с движения напред и назад. Разтъркайте венците внимателно 10 пъти. Ако е възможно, избягвайте търкане на зъбите.</p>
	<p>Внимателно повторете разтъркващото движение от противоположната страна на устата по долните венци още 10 пъти.</p>
	<p>Дръжте епруветката изправена, за да предотвратите разливане на стабилизиращата течност от епруветката. Развийте синята капачка от епруветката за вземане на проба, без да докосвате тампона.</p>
	<p>Обърнете капачката с главата надолу, вкарайте тампона в епруветката и затворете плтно капачката.</p>
	<p>Обърнете затворената епруветка и я разклатете енергично 15 пъти.</p>