
Réamhchúraimí bailiúcháin:

Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil le aon dromchla sula mbailítear é.

NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear sampla seile.

Úsáid bheartaithe: Tá an táirge seo deartha chun samplaí seile daonna ADN a bhailiú agus a chobhsú ó shamplaí béil duine.

Clár ábhair: Tá trealamh 1 bailiúchán ann












Rabhaidh agus réamhchúraimí: Guais tachtach. Ba chóir a bheith cúramach ag cuir an spúinse isteach sa bhéal.

Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS ag www.dnagenotek.com

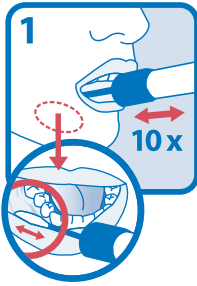
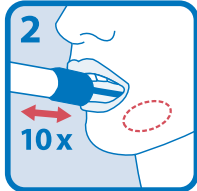

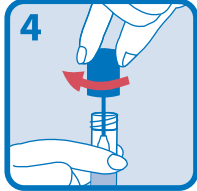
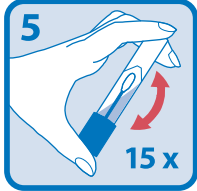
Stóras: 15°C-25°C

Achoimre agus miníú ar an trealamh: ORACollect-DNA féin bhailithe a sholáthraíonn na hábhair agus na treoracha chun samplaí seile daonna a bhailiú.

Eochair eolais lipéad:

	Uimhir Catalóg
	In vitro feiste leighis dhiagnóiseach
	CE marcáil
	Marcáil UKCA
	Monaróir
	Feiste leighis
	Ná athúsáid
	Téigh i gcomhairle lena treoracha úsáide
	Dáta dulta ó mhaith
	Uimhir lola
	Ionadaí Údaraithe

GAEILGE
Treoracha maidir le bailiú an sampla:

	Oscail an pacáiste agus bain amach an bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar sa bhéal agus is compordach agus cuimil feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na fiacla a chuimilt, más féidir.
	Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an taobh eile den bhéal feadh na gumaí íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise.
	Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an leacht cobhsú taobh istigh den fheadán a chosc ó dhoirteadh. Oscail an caipín ón bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a dhéanamh leis an spúinse.
	Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse isteach san fheadán agus dún an caipín go daingean.
	Aisiompáigh an feadán le caipín agus croith go tréan 15 uair.