

Sammendrag og forklaring av settet:

OMNigene-GUT inneholder materialer og instruksjer for å samle inn og stabilisere mikrobiel DNA fra en avføringsprøve.







Advarsler og forholdsregler:

- KUN TIL UTVORTES BRUK.
- Den gule rørtoppen må IKKE fjernes fra røret.
- Stabiliseringsvæsken i røret må IKKE søles.
- Vask med vann dersom væsken kommer i kontakt med øyne eller hud. Må IKKE inntas.
- Hvis du samler inn en avføringsprøve som er flytende, se separate angitte brukerinstruksjoner.
- Små gjenstander kan utgjøre en fare for kvelning.

Lagring: 15 °C til 25 °C

Forsendelse i samsvar med gjeldende forskrifter for transport av biologiske prøver. Se sikkerhetsdatabladet på www.dnagenotek.com

Symbolforklaring:

-  Ta prøven før (bruk før)
-  Katalognummer
-  Produsent
-  15°C til 25°C Instruksjoner for lagring
-  Forsiktig, se brukerinstruksjon
-  Partinummer

BRUKERINSTRUKSJON

Les hele brukerinstruksjonen før prøvetaking

Fremgangsmåte:



- 1 VIKTIGE FORBEREDELSE:**
- Tøm blæren din før du begynner å ta prøven.
 - Samle inn avføringsprøve som er fri for urin eller vann fra toalettet.
 - Det kan være nødvendig med toalett-papir eller hygienepapir.



- 2** Skru KUN av den purpurrøde hetten fra settet mens du holder i den gule rørtoppen, og legg den til side for senere bruk.




VIKTIG: Den gule rørtoppen må IKKE fjernes. Stabiliseringsvæsken i røret må IKKE søles.




- 3** Bruk spatelen til å samle inn en liten mengde av avføringsprøven.



Virkelig størrelse på avføringsprøven

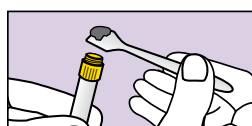

- 4** Før avføringsprøven over i den gule rørtoppen. Gjenta til prøven fyller den gule rørtoppen.

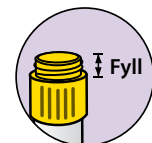


VIKTIG: Prøven må IKKE trykkes inn i røret.



- 5** Skrap horisontalt over rørtoppen for å jevne ut prøven, og fjern et eventuelt overskudd.


Tørk av røret og rørtoppen utvendig med toalett-papir eller hygienepapir ved behov.

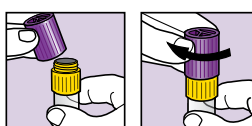

- 6** Ta opp den purpurrøde hetten med den tette enden rettet nedover, og skru den på den gule rørtoppen til den er godt lukket.




- 7** Rist det lukkede røret så kraftig og raskt som mulig frem og tilbake i minst 30 sekunder.

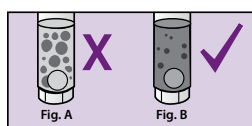

- 8** Avføringsprøven vil blande seg med stabiliseringsvæsken i røret; ikke alle partiklene vil løse seg opp.

VIKTIG: Fortsett ristingen dersom store partikler blir igjen, som vist i figur A.

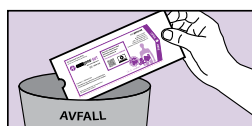

- 9** Legg spatelen i originalemballasjen, eller pakk den inn i toalett-papir og kast den i søppelet.

VIKTIG: Send prøven til prosessering ved å følge leveringsanvisningene som ble stilt til rådighet av leverandøren av settet.