

Shrnutí a vysvětlení sady:

OMNIGENE-GUT poskytuje materiály a pokyny pro odběr a stabilizaci mikrobiální DNA ze vzorku stolice.




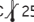


Varování a opatření:

- POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.
- NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek.
- NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky.
- Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. NEPOŽÍVEJTE.
- Pokud odebíráte vzorek tekuté stolice, podívejte se na samostatně poskytnuté pokyny k použití.
- Drobné předměty mohou představovat nebezpečí udušení.

Skladování: 15°C až 25°C

Posílejte v souladu s platnými předpisy pro přepravu biologických vzorků. Viz bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenetek.com


Legenda ke štítku:

-  Odeberte vzorek do (použijte do)
-  Katalogové číslo
-  Výrobce
- 15°C, 25°C  Skladovací pokyny
-  Pozor, přečtěte si pokyny k použití
-  Číslo šarže

POKYNY K POUŽITÍ

Před odběrem si přečtěte všechny pokyny

Postup:

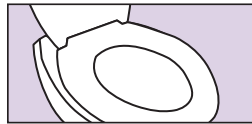

- 1 DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVA:**
- Před zahájením odběru se vymočte.
 - Odeberte vzorek stolice bez moči a vody z toalety.
 - Může být potřeba toaletní papír nebo ubrousky.




- 2** Držte žlutý vršek zkumavky a odšroubujte POUZE fialové víčko, které odložte pro pozdější použití.



DŮLEŽITÉ:
NEODSTRAŇUJTE žlutý vršek zkumavky.
NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky.

Nerozlijte obsah

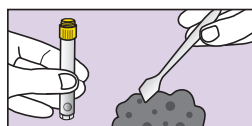


- 3** Pomocí špachtle odeberte malé množství vzorku stolice.



Skutečná velikost vzorku stolice.



- 4** Přeneste vzorek stolice do žlutého vršku zkumavky. Opakujte, dokud vzorkem nezaplníte žlutý vršek zkumavky.

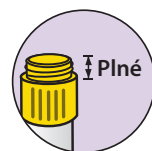


DŮLEŽITÉ: NETLAČTE vzorek do zkumavky.




- 5** Vodoryvně seškrábněte přes vršek zkumavky, abyste vzorek zarovnali a odstranili přebytečné množství.


Vnější část zkumavky podle potřeby otřete toaletním papírem nebo ubrouskem.

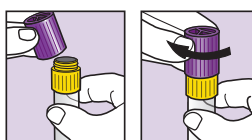

- 6** Vezměte fialové víčko tak, aby konec s plnou plochou směřoval dolů, a pevně našroubujte na žlutý vršek zkumavky.

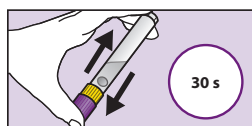


- 7** Co nejrychleji a nejsilněji zavřenou zkumavkou třepajte sem a tam alespoň 30 sekund.

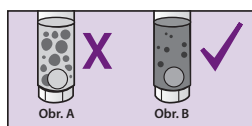

- 8** Vzorek stolice se promíchá se stabilizační tekutinou ve zkumavce. Ne všechny částice se rozpustí.

DŮLEŽITÉ: Dokud zůstávají velké částice jako na obrázku A, pokračujte ve třepání.

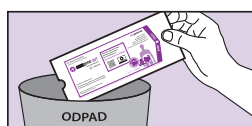

- 9** Špachtli vložte do původního obalu nebo zabalte do toaletního papíru a vyhodte.

DŮLEŽITÉ: Vzorek ke zpracování odešlete podle pokynů k odesílání samostatně dodaných poskytovatelem sady.