

Σύνοψη και επεξήγηση του κιτ:

Το OMNIGENE-GUT παρέχει τα υλικά και τις οδηγίες για τη συλλογή και τη σταθεροποίηση του μικροβιακού DNA από ένα δείγμα κοπράνων.






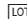
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΗΝ αφαιρείτε το κίτρινο πώμα από τον σωλήνα.
- ΜΗΝ χύνετε το σταθεροποιητικό υγρό που βρίσκεται στον σωλήνα.
- Ξεπλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. ΜΗΝ καταπίνετε.
- Εάν το δείγμα κοπράνων είναι υγρό, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστη που παρέχονται ξεχωριστά.
- Τα μικρά αντικείμενα ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

Αποθήκευση: 15°C έως 25°C

Στείλτε το δείγμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων. Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (MSDS), στη διεύθυνση www.dnagenotek.com

Επεξήγηση ετικέτας:

-  Συλλογή δείγματος έως (Ημ/νία λήξης)
-  Αριθμός καταλόγου
-  Κατασκευαστής
-  15°C / 25°C Οδηγίες αποθήκευσης
-  Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
-  Αριθμός παρτίδας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συλλογή

Διαδικασία:



1 Σημαντικά βήματα προετοιμασίας:

- Αδειάστε την κύστη σας προτού ξεκινήσετε τη συλλογή.
- Συλλέξτε δείγμα κοπράνων χωρίς ούρα ή νερό τουαλέτας.
- Μπορεί να χρειαστεί χαρτί τουαλέτας ή χαρτομάντιλα.




2 Κρατώντας το κίτρινο πώμα του σωλήνα, ξεβιδώστε ΜΟΝΟ το μωβ καπάκι και αφήστε το στην άκρη για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


ΜΗΝ αφαιρείτε το κίτρινο πώμα του σωλήνα.
ΜΗΝ χύνετε το σταθεροποιητικό υγρό στον σωλήνα.

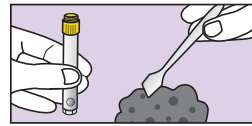

3 Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα για να συλλέξετε μικρή ποσότητα δείγματος κοπράνων.



Ιδανική ποσότητα δείγματος κοπράνων.

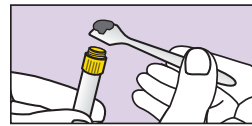

4 Μεταφέρετε το δείγμα κοπράνων στο κίτρινο πώμα του σωλήνα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το δείγμα να γεμίσει το κίτρινο πώμα του σωλήνα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ σπρώχνετε το δείγμα μέσα στον σωλήνα.



5 Ξύστε την επιφάνεια του πώματος του σωλήνα για να ισιώσετε το δείγμα και να αφαιρέσετε τυχόν περισσεια.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα και το πώμα με χαρτί τουαλέτας ή χαρτομάντιλο, όπως απαιτείται.




6 Κρατήστε το μωβ καπάκι με το συμπαγές άκρο στραμμένο προς τα κάτω και βιδώστε το στο κίτρινο πώμα του σωλήνα μέχρι να κλείσει ερμητικά.



Επάνω μέρος καπακιού




7 Ανακινήστε τον σφραγισμένο σωλήνα όσο το δυνατόν πιο δυνατά και γρήγορα με παλινδρομική κίνηση για τουλάχιστον 30 δευτ.

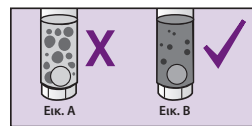

8 Το δείγμα κοπράνων θα αναμειχθεί με το σταθεροποιητικό υγρό στο σωλήνα. Δεν θα διαλυθούν όλα τα σωματίδια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνεχίστε την ανακίνηση, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα σωματίδια, όπως φαίνεται στην Εικόνα Α.

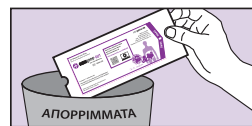

9 Τοποθετήστε τη σπάτουλα στην αρχική συσκευασία ή τυλίξτε τη με χαρτί τουαλέτας και απορρίψτε τη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στείλτε το δείγμα για επεξεργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες παράδοσης που παρέχονται χωριστά από τον πάροχο του κιτ.