

Sadržaj i objašnjenje pribora:

OMNigene-GUT obezbeđuje materijale i uputstva za uzimanje uzoraka i stabilizovanje mikrobne DNK iz uzorka stolice.




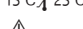


Upozorenja i mere opreza:

- SAMO ZA SPOLJNU UPOTREBU.
- NE uklanjajte žuti deo s bočice.
- NE prosipajte stabilizirajuću tečnost u bočicu.
- Isperite oči ili kožu vodom ako stabilizirajuća tečnost dođe u dodir s njima. NE gutajte.
- Ako je uzorak iz stolice tečan, pogledajte odvojeno korisničko uputstvo.
- Sitni predmeti mogu da uzrokuju gušenje.

Čuvanje: 15 °C do 25 °C

Transportujte u skladu s važećim pravilima o transportu bioloških uzoraka. Pogledajte MSDS na www.dnagenotek.com

Legenda oznaka:

-  Uzimanje uzorka do (Upotrebljivo do)
-  Kataloški broj
-  Proizvođač
-  15°C / 25°C Uputstva za čuvanje
-  Oprez, pratite uputstva za upotrebu
-  Broj partije

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte sva uputstva pre uzimanja uzorka.

Postupak:



1 VAŽNE PRIPREME:

- Ispraznite mokraćnu bešiku pre početka uzimanja uzorka.
- Uzmite uzorak stolice bez urina ili vode iz kupatila.
- Toaletni papir ili maramice će možda biti potrebne.




- #### 2
- Dok držite žuti vrh bočice, odvrnite SAMO ljubičasti poklopac sa pribora i ostavite ga sa strane za kasniju upotrebu.




VAŽNO:


NE uklanjajte žuti deo bočice.
NE sipajte stabilizirajuću tečnost u bočicu.

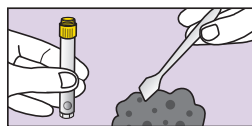

- #### 3
- Koristite lopaticu za uzimanje male količine uzorka stolice.

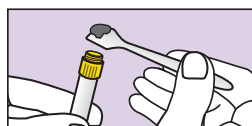

- #### 4
- Prenesite uzorak stolice u žuti vrh bočice. Ponavljate sve dok ne napunite žuti vrh bočice uzorkom.

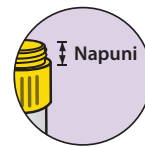


VAŽNO: NE gurajte uzorak u bočicu.



- #### 5
- Stružite horizontalno preko vrha bočice da biste izravnali uzorak i uklonili sav višak.


Po potrebi obrišite spoljašnjost i vrh bočice toaletnim papirom ili maramicom.

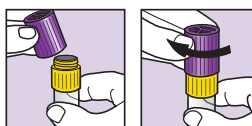

- #### 6
- Uzmite ljubičasti poklopac s čvrstim krajem okrenutim prema dole i zavrnite na žuti deo bočice dok ne bude čvrsto zatvorena.



- #### 7
- Protresite zatvorenu bočicu što jače i brže možete pokretima napred-nazad u trajanju od minimalno 30 sekundi.

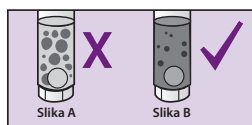

- #### 8
- Uzorak stolice će biti pomešan sa stabilizirajućom tečnošću u bočici; neće se sve čestice rastvoriti.

VAŽNO: Nastavite da mešate ako ostanu velike čestice kao što je prikazano na slici A.



- #### 9
- Stavite lopaticu u originalno pakovanje ili je zamotajte u toaletni papir i odložite u smeće.

VAŽNO: Pošaljite uzorak na obradu prateći uputstva za dostavljanje koja je dobavljač kompleta odvojeno isporučio.