

### Resume og forklaring af sættet:

OMNIGENE<sup>®</sup>-GUT leverer materiale og vejledning til indsamling og stabilisering af mikrobiel DNA fra en afføringsprøve.




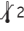


### Advarsler og forholdsregler:

- KUN TIL UDVORTES BRUG.
- Fjern IKKE den gule rørtop fra røret.
- Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.
- Skyl med vand, hvis øjne eller hud kommer i kontakt med væsken. Slug IKKE.
- Hvis afføringsprøven er flydende se separat leveret brugervejledning.
- Små dele kan føre til kvælning.

**Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur (15°C til 25°C), før og efter indsamling.

Forsendes i henhold til de relevante regler vedrørende transport af biologiske prøver. Se MSDS på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

### Etiketforklaring:

-  Indsamling af prøve inden (Mindst holdbar til)
-  Katalognummer
-  Producent
- 15°C / 25°C  Opbevaringsinstrukser
-  Advarsel, indhent instrukser for anvendelsen
-  Lot nummer

## BRUGERVEJLEDNING

### Læs alle instruktionerne før indsamlingen

#### Procedure:



### 1 VIGTIGE FORBEREDELSE:

- Tøm din blære før du tager prøven.
- Tag afføringsprøven uden urin eller toiletvand.
- Toilettepapir eller servietter kan være nødvendigt.




### 2

Mens du holder den gule rørtop, skru KUN det violette låg af, og sæt denne til side til senere brug.


#### VIGTIGT:

Fjern IKKE den gule rørtop. Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.

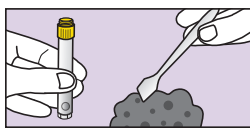

### 3


Brug spatlen til at indsamle en lille afføringsprøve.

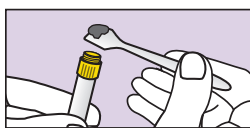

### 4

Overfør afføringsprøven ind i den gule rørtop. Fortsæt indtil prøven har fyldt den gule rørtop op.


**VIGTIGT:** Skub IKKE prøven ind i røret.

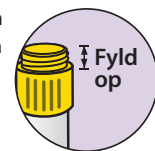

### 5

Skrab vandret hen over rørets top for at jævne prøven og fjern overskydende mængder.

Aftør røret udvendigt og toppen med toilettepapir eller en serviet, hvis nødvendigt.

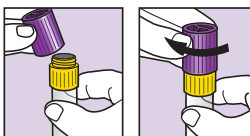


### 6

Tag den violette hætte ved den massive ende pegende nedad og skru den på den gule rørtop indtil den er lukket godt til.



### 7


Ryst det lukkede rør så kraftigt og hurtigt som muligt frem og tilbage i mindst 30 sekunder.

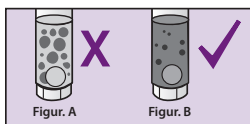

### 8

Afføringsprøven blandes sammen med stabiliseringsvæsken i røret; ikke alle partikler opløses.

**VIGTIGT:** Fortsæt med at ryste, hvis der er store partikler som på i figur. A.

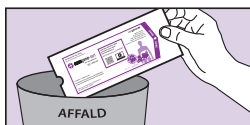

### 9

Læg spatlen tilbage i originalemballagen eller pak den ind i toilettepapir, og smid den ud med affaldet.

**VIGTIGT:** Indsend prøven til videre bearbejdning ved at følge leveringsinstrukserne, som leverandøren har sendt separat med sættet.