

Komplekti kokkuvõtlik selgitus:

OMNIGENE-GUT sisaldab materjale ja juhiseid mikrobiaalse DNA võtmiseks ja stabiliseerimiseks väljaheiteproovis.






Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- AINULT VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS.
- ÄRGE eemaldage tuubi küljest kollast tuubi ülaosa.
- ÄRGE loksutage tuubis olevat stabiliseerivat vedelikku.
- Peske veega, kui stabiliseeriv vedelik satub silma või nahale. MITTE alla neelata!
- Kui te võtate proovi vedelast väljaheitest, järgige eraldi saadetud kasutusjuhendit.
- Komplektis olevad väikesed osakesed võivad hingamisteedesse sattudes põhjustada lämbumisohtu.

Säilitamine: 15°C - 25°C

Saata vastavalt bioloogiliste proovide transportimise eeskirjadele. Vt MSDS veebilehelt www.dnagenotek.com

Etiketi tekst:

-  Proov võtta enne: (Kasutada enne:)
-  Katalooginumber
-  Tootja
- 15°C / 25°C Säilitamise juhised
-  Tähelepanu, vaadake kasutusjuhendit
-  Partii number

KASUTUSJUHEND

Lugege kasutusjuhend enne proovi võtmist hoolikalt läbi.

Protseduur:




- 1 OLULISED ETTEVALMISTUSED:**
- Tühjendage enne proovi võtmist põis.
 - Võtke väljaheiteproov nii, et see ei oleks koos uriini ega tualettipoti loputusveega.
 - Kasutage vajadusel tualettpaberit või pabertaskurätikuid.



- 2** Hoides tuubi kollasest ülaosast, kruvige AINULT lilla kork komplekti küljest lahti ja pange hilisemaks kasutamiseks kõrvale.



OLULINE: ÄRGE eemaldage tuubi kollast ülaosa. ÄRGE loksutage tuubis olevat stabiliseerivat vedelikku.

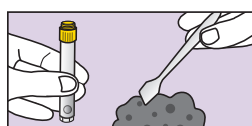

- 3** Kasutage spaatlit, et võtta väike kogus väljaheiteproovi.




- 4** Asetage väljaheiteproov tuubi kollasesse ülaossa. Korrake protseduuri, kuni proov täidab tuubi kollase ülaosa.




OLULINE: ÄRGE suruge proovi tuubi.




- 5** Eemaldage liigne väljaheite kogus tuubi ülaosast tuubi suuet horisontaalsuunas kraapides. Pühkige tuubi väliskülg ja tuubi ülaosa vajadusel tualettpaberi või pabertaskurätikuga puhtaks.

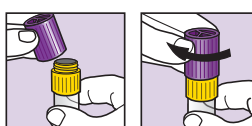

- 6** Võtke lilla kork kätte keermega allpool ja kruvige see kollase tuubi ülaosa külge, kuni see on kõvasti kinni.

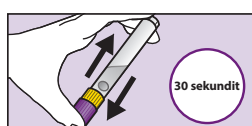


- 7** Raputage suletud tuubi vähemalt 30 sekundi vältel edasi ja tagasi liigutustega nii kõvasti ja kiiresti kui võimalik.

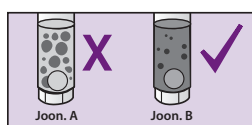

- 8** Väljaheiteproov seguneb tuubis oleva stabiliseeriva vedelikuga; kõik väljaheiteosakesed ei pruugi lahustuda.

OLULINE: Jätkake raputamist, kui tuubis on endiselt suured osakesed, nagu on näidatud joonisel A.

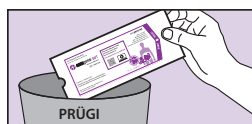

- 9** Asetage spaatel originaalpakendisse või mähkige see tualettpaberisse ja visake prügikasti.

OLULINE: Saatke proov analüüsimeks, järgides komplekti saatja poolt eraldi antud saatmisjuhiseid.