

唾液样本采集步骤:

采集注意事项:

在采集唾液样本前30分钟内, 请勿进食、饮水、抽烟或嚼口香糖。

在采集之前, 请确保海绵头未与任何表面接触。

用途: ORAc collect•Dx用于无创采集唾液样本。唾液样本中的人类DNA经分离和稳定处理, 适合用于FDA批准的分子诊断应用。使用ORAc collect•Dx采集的唾液样品经过稳定处理, 可以在环境条件下运输和/或长期储存。








内容物: 套件中包括稳定液。


警告和注意事项:

- 仅凭处方使用。供专业人员使用。
- 在采集样品之前, 请仔细阅读所有说明。如果不遵守说明, 可能会导致样本量不足并影响DNA量。
- 有窒息危险。将海绵插入口中时应小心。
- 患有口干症的人可能无法按照说明采集足够的样本, 从而导致DNA量不足并使样本无法用于检测。
- 如果稳定液与眼睛或皮肤接触, 请用清水冲洗。切勿摄入。请参阅www.dnagenotek.com上的材料安全数据表


储存: 15℃/25℃

标签说明:


	目录编号
	体外诊断医疗器械
	CE标志
	生产商
	授权代表
15℃/25℃	储存说明
	样本采集期限 (失效日期)
	批号

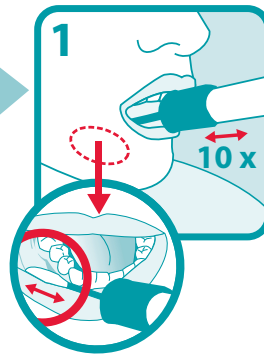


打开包装, 取出采集管, 注意不要碰到海绵头。将海绵尽可能深地放入口中 (以感到舒适为准), 并以来回移动的方式沿下牙龈摩擦 (见特写图)。轻轻沿牙龈摩擦10次。 如果可能, 避免摩擦牙齿。

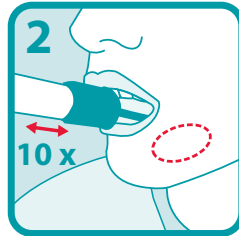


重复此步骤, 沿另一侧下牙龈轻轻摩擦10次。

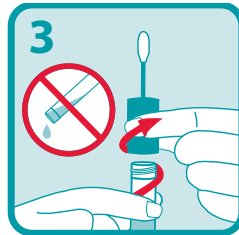

保持试管直立, 以防止试管内的稳定液溢出。拧下采集管的蓝色盖子, 注意不要碰到海绵。

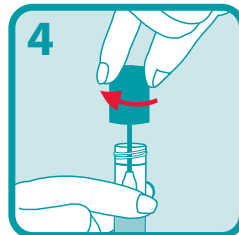

将盖子倒过来, 然后将海绵插入试管中并盖紧子。

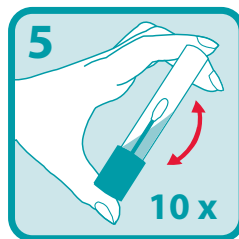

盖好盖子后, 倒转试管并用力摇晃10次。



用于体外诊断



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

DNAGENOTEK™ 卓越的样本
经过业界检验的性能

*ORAc collect是DNA Genotek Inc.的注册商标。
某些DNA Genotek™产品可能并非在所有地区销售, 请联系您的销售代表, 获取详细信息。
所有DNA Genotek方案、白皮书和应用说明都可以在网站www.dnagenotek.com的支持部分获得。