



Příprava k odběru:

Před odběrem se konec tyčinky s hubkou NESMÍ dostat do kontaktu s jakýmkoli povrchem.

Po dobu 30 minut před odběrem vzorku slin dárce NESMÍ jíst, pít, kouřit nebo žvýkat žvýkačku.

Určené použití: Odběr a stabilizace RNA ze vzorků lidských slin

Obsah: Obsahuje 1 odběrovou sadu

Upozornění a opatření: Nebezpečí udušení. Při vložení hubky do úst je nutno postupovat opatrně.

Pokud se stabilizační tekutina dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. **NEPOŽÍVEJTE.** Podívejte se na bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenotek.com

Uchovávání: 15 °C – 25 °C

Shrnutí a vysvětlení k sadě: ORACollect-RNA je sada k samoodběru vzorků, obsahující materiály a pokyny k odběru vzorků lidských slin.

Legenda ke štítku:

- Katalogové číslo
- K použití pouze na lékařský předpis
- Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
- Označení CE
- Označení UKA
- Výrobce
- Zdravotnický prostředek
- Nepoužívejte opakovaně
- Přečtěte si pokyny k použití
- Použitelné do
- Číslo šarže
- Pověřený zástupce

	<p>Otevřete obal a vyjměte odběrový nástroj. Nedotýkejte se konce tyčinky s hubkou. Vložte hubku do úst co nejdál to bude pohodlně možné a otírejte jí dolní dásně (viz zvětšené vyobrazení) pohybem dopředu a dozadu. Zlehka 10krát otřete dásně. Pokud možno neotírejte zuby.</p>
	<p>Stejnými pohyby zlehka otírejte dolní dásně na druhé straně úst a znovu zopakujte pohyb 10krát.</p>
	<p>Držte zkumavku ve svislé poloze, aby se z ní nevyllila stabilizační tekutina. Odšroubujte uzávěr z odběrové zkumavky, aniž byste se dotkli hubky.</p>
	<p>Obraťte uzávěr dnem vzhůru, vložte hubku do zkumavky a pevně zavřete uzávěr.</p>
	<p>Obraťte uzavřenou zkumavku a energicky ji 15krát protřepejte.</p>