



Precauții privind colectarea:

Asigurați-vă că vârful buretelui NU intră în contact cu nicio suprafață înainte de colectare.

Donatorul NU trebuie să mănânce, să bea, să fumeze sau să mestecă gumă timp de 30 de minute înainte de a se colecta proba de salivă.

Utilizare prevăzută: Pentru colectarea și stabilizarea ARN-ului din probe de salivă umană

Conținut: Conține 1 kit de colectare

Avertismente și precauții: Pericol de sufocare. Trebuie să aveți grijă atunci când introduceți buretele în gură.

Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator sau proba intră în contact cu ochii sau pielea. NU înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la www.dnagenotek.com

Depozitare: 15°C-25°C

Rezumat și detalii despre set: ORACollect-RNA este un kit de auto-colectare care oferă materialele și instrucțiunile pentru colectarea probelor de salivă umană.

Legendă etichetă:

- Număr catalog
- Numai pentru utilizare pe bază de rețetă
- Dispozitiv medical de diagnostic in vitro
- Marcaj CE
- Marcaj UKCA
- Producător
- Dispozitiv medical
- Nu refolosii
- Consultați instrucțiunile de utilizare
- Data expirării
- Număr lot
- Reprezentant autorizat

	<p>Deschideți pachetul și scoateți colectorul fără a atinge vârful buretelui. Așezați buretele cât mai în spatele cavității bucale, în limitele confortului, și frecați de-a lungul gingiilor inferioare (a se vedea imaginea de aproape), înapoi și înainte. Frecați ușor gingiile de 10 ori. Dacă este posibil, evitați frecarea dinților.</p>
	<p>Repețiți ușor mișcarea de frecare pe partea opusă a gurii, de-a lungul gingiilor inferioare, încă de 10 ori.</p>
	<p>Țineți tubul în poziție verticală pentru a preveni scurgerea lichidului stabilizator din interiorul tubului. Deșurubați capacul din tubul de colectare fără a atinge buretele.</p>
	<p>Întoarceți capacul cu capul în jos, introduceți buretele în tub și închideți strâns capacul.</p>
	<p>Răsturnați tubul cu capac și agitați energic de 15 ori.</p>



Pentru diagnosticare *in vitro*, utilizare numai pe bază de rețetă și pentru utilizare sub autorizație de utilizare de urgență.

Acest dispozitiv de colectare a probelor nu a fost aprobat sau autorizat de FDA.

Acest dispozitiv de colectare a probelor a fost autorizat de FDA conform unei autorizații de utilizare de urgență (EUA).

Acest dispozitiv de colectare a probelor a fost autorizat numai pentru colectarea și întreținerea speciemenelor de salivă ca ajutor în detectarea acidului nucleic din SARS-CoV-2 și nu pentru un alt virus sau agent patogen.

Acest dispozitiv de colectare a probelor este autorizat numai pe durata declarației prin care se afirmă că există circumstanțe care justifică autorizarea utilizării de urgență a diagnosticului in vitro pentru detectarea și/sau diagnosticarea COVID-19 în conformitate cu secțiunea 564(b)(1) din Legea Federală a Alimentației, Medicamentelor și Cosmeticilor, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), cu excepția cazului în care autorizația este reziliată sau revocată mai devreme.