



Предпазни мерки при вземане на проба:

Донорът НЕ трябва да яде, пие, пуши или дъвче дъвка в продължение на 30 минути преди вземането на пробата от слюнка.

Уверете се, че върхът на тампона НЕ влиза в контакт с каквато и да е повърхност преди вземането на проба.

Предназначение: ORAcollect[®]Dx е предназначен за използване при неинвазивно вземане на проби от слюнка. Човешката ДНК от слюнката е изолирана, стабилизирана и подходяща за употреба в одобрени от FDA молекулярни диагностични приложения. Пробите от слюнка, взети с помощта на ORAcollect[®]Dx, са стабилизирани и могат да се транспортират и/или съхраняват дългосрочно при стандартни условия и стайна температура.









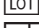
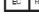

Съдържание: Комплектът съдържа стабилизираща течност.

Предупреждения и предпазни мерки:

- Само с предписание (Rx). За използване от професионалисти.
- Прочетете внимателно всички инструкции преди вземането на проба; неспазването им може да доведе до неподходяща проба и да повлияе на количеството събрана ДНК.
- Риск от задушаване. Трябва да се внимава при вкарване на тампона в устата.
- Донорите с ксеростомия (сухота в устата) може да не вземат подходяща проба, като спазват тези инструкции, което води до по-ниско количество на събрана ДНК и невалидна проба.
- Измийте с вода, ако стабилизиращата течност влезе в контакт с очите или кожата. НЕ поглъщайте. Вж. Информационния лист за безопасност на материала на адрес www.dnagenotek.com

Съхранение: 15°C-25°C

Легенда на етикета:

-  Каталожен номер
-  Медицинско изделие за инвитро диагностика
-  CE маркировка
-  UKCA маркировка
-  Производител
-  Медицинско изделие
-  Не използвайте повторно
-  Консултирайте се с инструкциите за употреба
-  Вземете пробата до (Срок на годност)
-  Номер на партида
-  Упълномощен представител

	<p>Отворете опаковката и извадете колектора, без да докосвате върха на тампона. Поставете тампона колкото може по-навътре в устата, без пациентът да изпитва дискомфорт, и потъркайте в долните венци (вижте изображението отблизо) с движения напред и назад. Разтъркайте венците внимателно 10 пъти. Ако е възможно, избягвайте търкане на зъбите.</p>
	<p>Внимателно повторете разтъркващото движение от противоположната страна на устата по долните венци още 10 пъти.</p>
	<p>Дръжте епруветката изправена, за да предотвратите разливане на стабилизиращата течност от епруветката. Развийте синята капачка от епруветката за вземане на проба, без да докосвате тампона.</p>
	<p>Обърнете капачката с главата надолу, вкарайте тампона в епруветката и затворете плътно капачката.</p>
	<p>Обърнете затворената епруветка и я разклатете енергично 10 пъти.</p>