



Piesardzības pasākumi pirms parauga paņemšanas:

30 minūtes pirms siekalu parauga paņemšanas donors NEDRĪKST ēst, dzert, smēķēt vai lietot košļājamo gumiju.

Pārliecinieties, ka sūkliša gals pirms parauga paņemšanas NENONĀK saskarē ar jebkādu virsmu.

Paredzētā lietošana: ORAcollect[®]Dx ir paredzēts neinvazīvai siekalu paraugu savākšanai. Cilvēka DNS no siekalu parauga tiek izolēts, stabilizēts un ir piemērots FDA (Amerikas Zāļu aģentūras) noteiktajiem molekulārās diagnostikas lietojumiem. Siekalu paraugi, kas paņemti, izmantojot ORAcollect-Dx, tiek stabilizēti un tos var ilgstoši transportēt un/vai uzglabāt apkārtējās vides apstākļos.












Saturs: komplektā ietilpst stabilizējošs šķidrums.

Brīdinājumi un piesardzība:

- R x tikai. Profesionālai lietošanai.
- Pirms parauga paņemšanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. To neievērošanas dēļ var iegūt nepareizu paraugu, kas ietekmē DNS rezultātu.
- Aizrišanās risks. Ievietojot sūklieti mutē, jāievēro piesardzība.
- Donori ar kserostomiju (sausas mutes sindroms), izmantojot šīs instrukcijas, var neiegūt atbilstošu paraugu, kā rezultātā samazinās DNS guvums un paraugs ir nederīgs lietošanai.
- Ja stabilizējošais šķidrums nonāk saskarē ar acīm vai ādu, nomazgājiet to ar ūdeni. NENORĪT. Skatīt drošības datu lapu www.dnagenotek.com

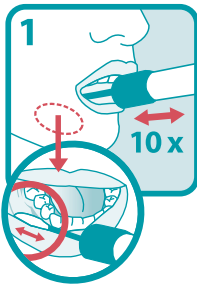


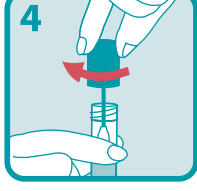
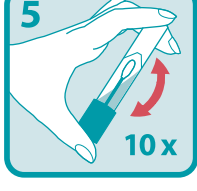
Uzglabāšana: 15°C-25°C

Etiķetes saturs:

	Kataloga numurs
	Medicīniska ierīce in vitro diagnostikai
	CE marķējums
	UKCA marķējums
	Ražotājs
	Medicīniska ierīce
	Nelietot atkārtoti
	Skatiet lietošanas instrukcijas
	Paņemt paraugu līdz (Izlietot līdz)
	Partijas numurs
	Pilnvarotais pārstāvis

LATVIEŠU VALODA

Procedūra siekalu parauga paņemšanai:

	<p>Atveriet iepakojumu un izņemiet parauga paņemšanas mēģeni, nepieskaroties sūkliša galam. Ievietojiet sūklieti pēc iespējas ērtāk un dziļāk mutē un paberzējiet apakšējās smaganas (skatīt tuvplāna attēlu) uz priekšu un atpakaļ. Maigi paberzējiet smaganas 10 reizes. Ja iespējams, neberzējiet zobus.</p>
	<p>Maigi atkārtojiet berzēšanas kustību pretējā mutes pusē gar apakšējām smaganām vēl 10 reizes.</p>
	<p>Turiet mēģeni vertikāli, lai novērstu tās iekšpusē esošā stabilizējošā šķidruma izšļakstīšanos. Atskrūvējiet parauga paņemšanas mēģenes zilo vāciņu, neskarot sūklieti.</p>
	<p>Pagrieziet vāciņu otrādi, ievietojiet sūklieti mēģenē un cieši aizveriet vāciņu.</p>
	<p>Apgrieziet aizvākoto mēģeni un enerģiski sakratiet 10 reizes.</p>