



### Precauções na recolha:

O doador **NÃO** deve comer, beber, fumar ou mascar pastilha elástica 30 minutos antes da recolha da amostra de saliva.

Garanta que a esponja **NÃO** entra em contacto com qualquer superfície antes da recolha.

**Utilização prevista:** o ORACollect<sup>®</sup>Dx foi concebido para a recolha não invasiva de amostras de saliva. O ADN humano da amostra de saliva é isolado, estabilizado e adequado para utilização em aplicações de diagnóstico molecular autorizadas pela FDA. As amostras de saliva recolhidas com o ORACollect<sup>®</sup>Dx são estabilizadas e podem ser transportadas e/ou armazenadas a longo prazo em condições normais de temperatura e pressão.












**Conteúdo:** kit com líquido estabilizador.

### Avisos e precauções:

- Apenas para utilização mediante prescrição médica. Exclusivamente para uso profissional.
- Leia atentamente as instruções na íntegra antes da recolha da amostra; a recolha incorreta pode gerar uma amostra inadequada e afetar o rendimento de ADN.
- Perigo de asfixia. A esponja deve ser colocada dentro da boca com cuidado.
- Os doadores com xerostomia (secura da boca) podem não conseguir realizar a recolha de uma amostra adequada com estas instruções e gerar um rendimento de ADN inferior e uma amostra que não pode ser utilizada.
- Lavar com água se o líquido estabilizador entrar em contacto com os olhos ou a pele. **NÃO** ingerir. Consultar a Ficha de Dados sobre Segurança de Materiais em [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

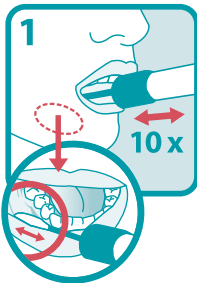
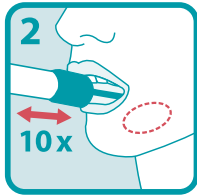


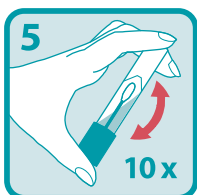
**Armazenamento:** 15 °C a 25 °C

### Legenda do rótulo:

	Número de catálogo
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Marcação CE
	Marcação UKCA
	Fabricante
	Dispositivo médico
	Não reutilizar
	Consultar as instruções de utilização
	Recolher amostra até (Data de validade)
	Número de lote
	Representante autorizado

## PORTUGUÊS

### Procedimento para a recolha de amostras de saliva:

	<p>Abra a embalagem e retire o coletor sem tocar na esponja. Coloque a esponja na boca, o mais para dentro possível sem criar desconforto, e esfregue a escova nas gengivas inferiores (ver imagem mais pormenorizada) com movimentos para trás e para a frente. Esfregue cuidadosamente as gengivas 10 vezes. Se possível, evite esfregar a esponja nos dentes.</p>
	<p>Repita cuidadosamente o movimento no lado oposto da boca ao longo das gengivas inferiores mais 10 vezes.</p>
	<p>Segure o tubo na vertical para não derramar o líquido estabilizador existente no interior do mesmo. Desenrosque a tampa azul do tubo coletor sem tocar na esponja.</p>
	<p>Vire a tampa para baixo, insira a esponja no tubo e feche bem a tampa.</p>
	<p>Já com a tampa fechada, vire o tubo ao contrário e agite-o bem 10 vezes.</p>