



Mintagyűjtési óvintézkedések:

A donor NEM ehet, ihat és dohányozhat, illetve nem használhat rágógumit a nyálminta gyűjtése előtt 30 percig.

Gondoskodjon arról, hogy a szivacsos hegy NE érintkezzen semmilyen felülettel a mintavétel előtt.

Rendeltetészerű használat: Az ORAc collect®·Dx nyálminták nem invazív gyűjtésére szolgál. Izolálja és stabilizálja a nyálmintából származó emberi DNS-t, és alkalmas az FDA által jóváhagyott molekuláris diagnosztikai alkalmazásokra. Az ORAc collect·Dx segítségével gyűjtött nyálminták stabilizáltak, és hosszú távon szállíthatók és/vagy tárolhatók normál környezeti feltételek mellett.

Tartalom: A készlet stabilizáló folyadékot tartalmaz.

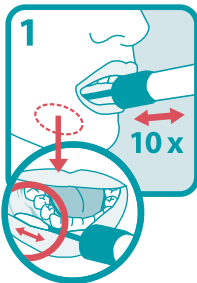
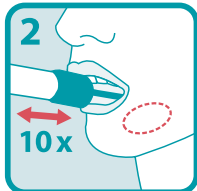


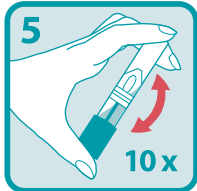
Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Csak vényköteles használatra. Szakember általi használatra.
- Mintavétel előtt gondosan olvassa el az összes utasítást; az utasításoktól való eltérés nem megfelelő mintát és elégtelen kinyert DNS-t eredményezhet.
- Fulladásveszély. A szivacs szájba helyezésekor óvatosan kell eljárni.
- Előfordulhat, hogy a xerostomiás (szájszárazságot tapasztaló) donorktól nem gyűjthető megfelelő minta ezen utasítások alkalmazásával, ami alacsonyabb mennyiségű kinyert DNS-t és használatra alkalmatlan mintát eredményezhet.
- Ha a stabilizáló folyadék a szemével vagy a bőrével érintkezik, mossa le vízzel. NE nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot (MSDS) a www.dnagenotek.com honlapon tekintheti meg.

Tárolás: 15 °C-25 °C

A címkén lévő jelmagyarázat:

- REF Katalógusszám
- IVD In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
- CE CE-jelölés
- UK UKCA-jelölés
- Gyártó
- MD Orvostechnikai eszköz
- Ne használja újra
- Olvassa el a használati utasítást
- Mintagyűjtés elvégezhető (Felhasználható) eddig:
- LOT Tételszám
- EC REP Meghatalmazott képviselő

	<p>Bontsa fel a csomagot és vegye ki a gyűjtőeszközt anélkül, hogy a szivacsos hegyhez érne. Helyezze a szivacsot olyan hátulra a szájban, amennyire még kényelmes, és dörzsölje az alsó fogínyhez (lásd a közeli képet) előre-hátra irányú mozdulatokkal. Dörzsölje meg finoman a fogínyt 10 alkalommal. A fogakat lehetőség szerint ne dörzsölje.</p>
	<p>Ismételje meg a finom dörzsölő mozdulatot a száj másik oldalán az alsó fogínyen további 10 alkalommal.</p>
	<p>Tartsa függőlegesen a csövet, hogy a benne lévő stabilizáló folyadék ne folyjon ki. Csavarja le a kék kupakot a gyűjtőcsőről anélkül, hogy a szivacsához érne.</p>
	<p>Fordítsa fejjel lefelé a kupakot, illessze a szivacsot a csőbe, majd zárja le szorosan a kupakot.</p>
	<p>Fordítsa meg a lezárt csövet, és rázza meg erőteljesen 10-szer.</p>