



Réamhchúraimí bailiúcháin:

NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear sampla seile.

Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil le aon dromchla sula mbailítear é.

Úsáid bheartaithe: Tá ORAcollect[®]Dx beartaithe le húsáid i mbailiúcháin neamh-ionrach samplaí seile. Tá ADN an duine ón sampla seile ar leithlis, cobhsaithe agus oiriúnach le haghaidh feidhmchlár diagnóiseach móilíneach ceadaithe ag FDA. Tá na samplaí seile a bhailítear ag úsáid ORAcollect[®]Dx a cobhsaithe agus is féidir iad a iompar agus/nó a stóráil go fadtéarmach ag coinníollacha comhthimpeallacha.












Clár ábhair: Tá leacht cobhsú sa trealamh.

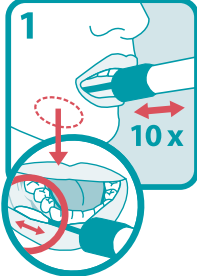
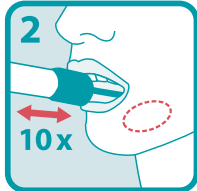

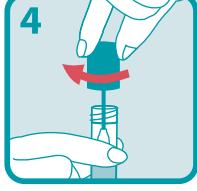
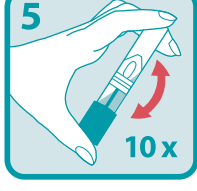
Rabhadh agus réamhchúraimí:

- Rx amháin. Le húsáid ghairmiúil.
- Léigh na treoracha go cúramach sula mbailítear samplaí; d'fhéadfadh aon athrú sampla easpach agus tionchar ar ADN a bheith mar thoradh a thabhairt.
- Guais tachtach. Ba chóir a bheith cúramach ag cuir an spúinse isteach sa bhéal.
- Fhéadfadh deontóirí le xerostomia (béal tirim) gan sampla leordhóthanach a bhailiú ag baint úsáide as na treoracha seo agus toradh níos ísle ADN agus sampla neamhbhailí le húsáid mar thoradh air.
- Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS ag www.dnagenotek.com

Stóras: 15°C-25°C

Eochair eolais lipéad:

-  Uimhir Catalóg
-  Feiste leighis In Vitro Diagnóiseach
-  CE marcáil
-  Marcáil UKCA
-  Monaróir
-  Feiste leighis
-  Ná athúsáid
-  Téigh i gcomhairle lena treoracha úsáide
-  Bailigh sampla faoi (Úsáid faoi)
-  Uimhir lola
-  Ionadaí Údaraithe

	<p>Oscail an pacáiste agus bain amach an bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar sa bhéal agus is compordach agus cuimil feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na fiacla a chuimilt, más féidir.</p>
	<p>Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an taobh eile den bhéal feadh na gumaí íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise.</p>
	<p>Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an leacht cobhsú taobh istigh den fheadán a chosc ó dhoirteadh. Oscail an caipín ón bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a dhéanamh leis an spúinse.</p>
	<p>Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse isteach san fheadán agus dún an caipín go daingean.</p>
	<p>Aisiompaigh an feadán le caipín agus croith go tréan 10 uaire.</p>