



**Precauzioni per la raccolta:**

**Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare o masticare gomma per i 30 minuti che precedono la raccolta del campione di saliva.**

**Assicurarsi che la punta della spugna NON entri in contatto con alcuna superficie prima della raccolta.**

**Uso previsto:** ORAc collect-Dx è destinato alla raccolta non invasiva di campioni di saliva. Il DNA umano viene isolato dal campione di saliva, stabilizzato e reso idoneo per l'uso nelle applicazioni diagnostiche molecolari approvate dalla FDA. I campioni di saliva raccolti usando ORAc collect-Dx sono stabilizzati e possono essere trasportati e/o conservati a lungo a temperatura ambiente.

**Contenuto:** il kit contiene liquido stabilizzante.

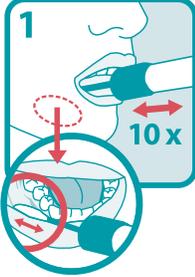
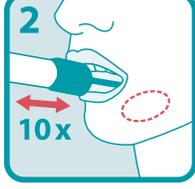
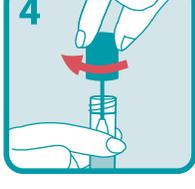
**Avvertenze e precauzioni:**

- Solo per Rx. Per uso professionale.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima della raccolta del campione; si possono verificare scostamenti in un campione inadeguato e questi possono influenzare negativamente la resa del DNA.
- Rischio di soffocamento. Occorre inserire la spugna in bocca con cautela.
- I donatori che soffrono di xerostomia (bocca secca) potrebbero non raccogliere un campione adeguato seguendo queste istruzioni e il risultato sarebbe una minore resa di DNA e un campione non idoneo all'uso.
- Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto con gli occhi o con la pelle. NON ingerire. Vedere la scheda dati sicurezza materiale su [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Conservazione:** tra 15°C e 25°C

**Legenda dell'etichetta:**

-  Numero di catalogo
-  Dispositivo medico diagnostico per diagnosi in vitro
-  Contrassegno CE
-  Contrassegno UKCA
-  Produttore
-  Dispositivo medico
-  Non riutilizzare
-  Consultare le istruzioni per l'uso
-  Raccogliere il campione entro (Utilizzare entro)
-  Numero di lotto
-  Rappresentante autorizzato

	<p>Aprire la confezione e rimuovere il raccogliitore senza toccare la punta della spugna. Posizionare la spugna più indietro possibile in bocca purché non crei disagio e sfregare lungo le gengive inferiori (vedere immagine ravvicinata) con un movimento avanti e indietro. Sfregare delicatamente le gengive 10 volte. Se possibile evitare di sfregare i denti.</p>
	<p>Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento dal lato opposto della bocca lungo le gengive inferiori per altre 10 volte.</p>
	<p>Tenere la provetta in verticale per impedire che il liquido stabilizzante all'interno della provetta si versi. Svitare il cappuccio blu dalla provetta di raccolta senza toccare la spugna.</p>
	<p>Capovolgere il cappuccio, inserire la spugna nella provetta e chiudere bene il cappuccio.</p>
	<p>Capovolgere la provetta con il cappuccio inserito e scuoterla vigorosamente 10 volte.</p>